


表情を隠さない防曇透明マスク


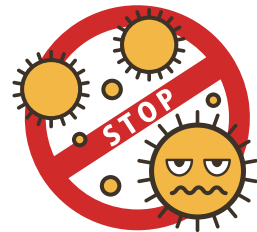


ルカミイ®

'Lookatme'

特許取得商品


【発明の名称】透明マスク

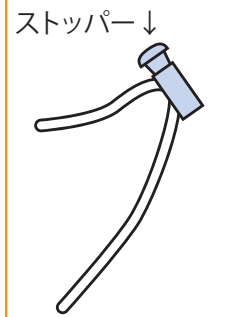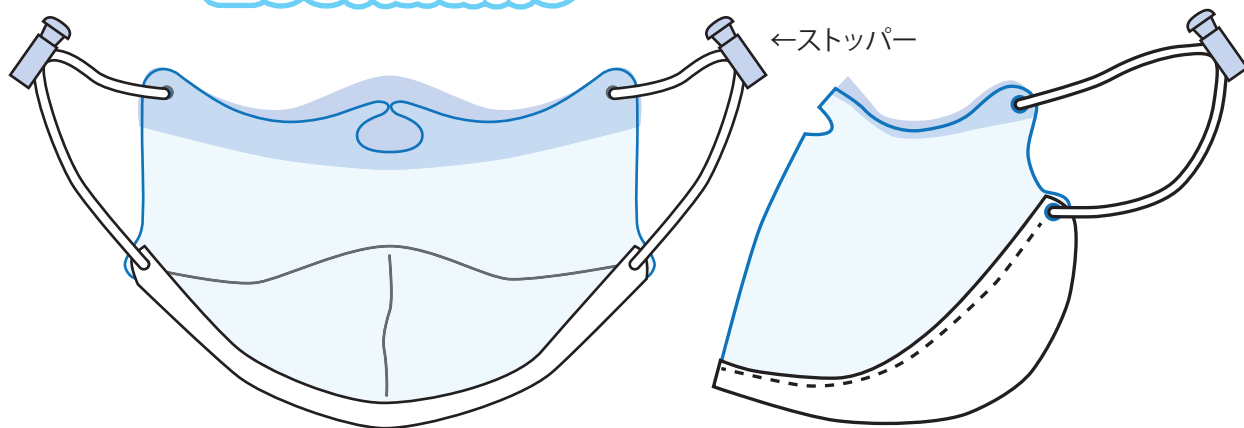

ゴム部分のストッパーで、
フィットिंगしてください。

- ◎ルカミイは透明部に特殊な化学的防曇処理をした硬質セルローズフィルムを使用しています。
- ◎防曇スプレーを塗布した一般の防曇フィルムは何回か使用したり拭き取ると防曇性能が落ちてくるのに対し、ルカミイは繰り返し使用しても、拭き取っても高い防曇性能が持続します。
- ◎ルカミイは自然のウェットマスクです。装着中にマスクの内部は湿度が上昇します。この時、薄い水の皮膜の結露が発生して防曇性が現れます。この湿度がウィルスを不活性化します。

装着方法

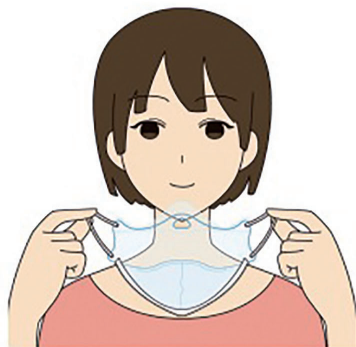

マスクの内側を自分に向けて持ち、
一般の衛生マスクと同じ要領で装
着します。



マスク下部の不織布にあるゴムを
つまみ、喉元まで引っ張り、安定さ
せます。



これで正しく装着できました。

ルカミイ専用ケース



- 商品サイズ:
・約125×150mm
- 材質:
・合成皮革



ご使用上の注意点

- ルカミイは使用後、洗って頂ければ繰り返しお使い頂けるマスクです。
- 壊れたら新しいマスクに取り替えてください。
- 中性洗剤で**手洗い後**、十分に乾かしてからお使いください。
- 使用を中断または終える際は、手洗いで清潔にしてからケース(別売)に入れて保管して下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。破損の原因となります。
- 使用中に皮膚に異常が発生した場合は、すぐにご使用をおやめ下さい。
- 呼吸で透明フィルム内側が濡れることがあります。その場合は乾いた布で優しく拭き取して下さい。
- 持ち運びの際はポケットに入れたり、折り曲げたりしないで下さい。破損の原因になります。
- 持ち運びや保管は専用のケースに入れることをおすすめします。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管して下さい。
- ご使用中に息のしづらさ、暑さを感じた時は一度外して下さい。